

WITH●IN 取り扱い説明書

ウィズインとは？

- 膈内を浄化し衛生を保つことで健やかにします。
- 手を汚さず、簡単に洗浄できます。
- 使いきりタイプで、手間いらず。


開発・設計について

- 300人の女性アンケートで選ばれたスリムタイプ。
協力：株式会社ネオマーケティング

WITH●IN × カタチ

4
points

衛生面と使いやすさを両立した ワンプッシュ・スマート設計

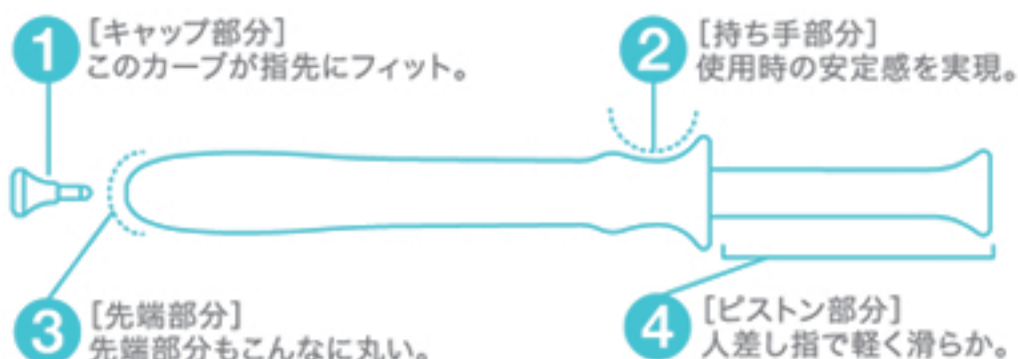

ノズル：PP/ピストン：PP/キャップ：PE/リング：シリコーン

内容成分について

- ナチュラルな使い心地。安心な成分のみを厳選。

natural 無色透明 / 無味無臭

【内容成分】



精製水 / グリセリン / ヒドロキシエチルセルロース / プロパンジオール / 乳酸 / クエン酸ナトリウム / ヒドロキシプロピルシクロデキストリン / ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル / EDTA-2Na / ヒアルロン酸Na / コンドロイチン硫酸Na

販売名	ウィズイン
一般名称	膈洗浄器
類 引	管理医療機器 医療機器製造販売認証番号 302AKBZX00025000
内容量	1.7g
製造販売元	有限会社クサノハ化粧品 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町123-1
ウェブサイト	https://www.within.jp/

使用上の注意をよく読んでお使い下さい。

ご使用方法

- 1 「OPEN」の印から袋を開封して持ち手部分から取り出してください。
 - 2 キャップは真っ直ぐ引き抜いてください。
 - 3 容器の先端からゆっくり膈へ挿入してください。
 - 4 ゆっくりとピストンを押し洗浄液を出してください。
- ! 挿入は矢印で示す膨らみの部分までにしてください。

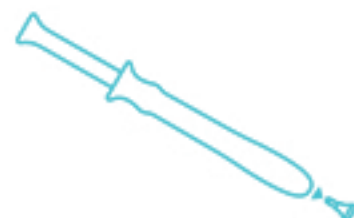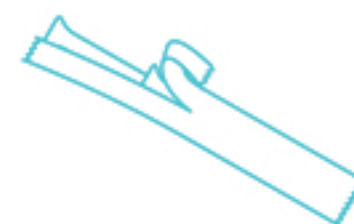

ご使用上の注意

! 再使用禁止

- 本膈洗浄器は1本1回限りの使いきりタイプです。再利用は絶対におやめ下さい。
- 品質を保持する為キャップを外した後は、すぐにご使用ください。
- 使用後は、軽く拭き取るか洗い流してください。
- 妊娠中や局部に炎症等異常のある場合は、ご使用前に医師にご相談ください。
- 避妊効果はありません。避妊フィルム等の殺精子剤を使用した後にお使いになると、避妊効果がなくなることがありますので本品のご使用をおやめください。
- ウィズインは膈洗浄器です。避妊用品ではありません。膈内洗浄の目的以外に使用しないでください。
- ご使用中に万一異常が発生した場合には、ご使用を中止し医師にご相談ください。ご使用後も症状が続く場合は医師にご相談ください。

MADE IN JAPAN 第1版